

Multi-Gyn® Vaginale Douche



LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK VAN MULTI-GYN VAGINALE DOUCHE & BRUISTABLETTEN EN BEWAAR VOOR REFERENTIE

MULTI-GYN VAGINALE DOUCHE VOOR OPTIMALE HYGIËNE VAN DE VAGINA

- Spoelt efficiënt en zacht schoon
- Het speciale klepje maakt het onmogelijk om vloeistof terug op te zuigen, vermindert opgebouwde spanning en creëert een ideaal spoeeffect
- Ergonomisch doucheapparaat dat in verschillende houdingen gebruikt kan worden

INDICATIE

Multi-Gyn Vaginale Douche en Bruistabletten zijn ideaal voor algemene vaginale hygiëne. Of voor intensieve vaginale hygiëne in geval van overmatige of onprettig ruikende afscheiding, jeuk, irritatie en een brandend gevoel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Sommige vrouwen zijn vatbaarder voor vaginale ongemakken dan andere, door onder andere levensstijl, seksuele activiteit en menstruatie. Afhankelijk van je persoonlijke hygiënebehoeften kan Multi-Gyn Vaginale Douche vaker gebruikt worden; echter, het is niet aan te raden om de Multi-Gyn Vaginale Douche meer dan één keer per week te gebruiken, tenzij een arts dit adviseert. Raadpleeg altijd een arts bij aanhoudende vaginale klachten.


De Multi-Gyn Vaginale Douche kan in verschillende houdingen gebruikt worden. Ga in de meest comfortabele houding zitten om de Multi-Gyn Vaginale Douche te gebruiken. Het is belangrijk dat de douchevloeistof makkelijk weg kan vloeien. Bijvoorbeeld in de douche of boven een toiletpot. Bekijk de geïllustreerde gebruiksaanwijzingen van de Multi-Gyn Vaginale Douche hieronder.

MULTI-GYN VAGINALE DOUCHE EN ZWANGERSCHAP

Als u zwanger probeert te raken, adviseren wij om de Multi-Gyn Vaginale Douche niet te gebruiken tot 3 dagen na de seksuele gemeenschap. De Multi-Gyn Vaginale Douche is geen voorbehoedsmiddel. Multi-Gyn Vaginale Douche kan voor zover bekend worden gebruikt tijdens een normale zwangerschap of bij het geven van borstvoeding. Bij twijfel altijd een arts of verloskundige raadplegen.

LET OP

Leg de Multi-Gyn Vaginale Douche nooit in kokend water en reinig het ook niet met kokend water. Het zal onherstelbaar gaan vervormen.

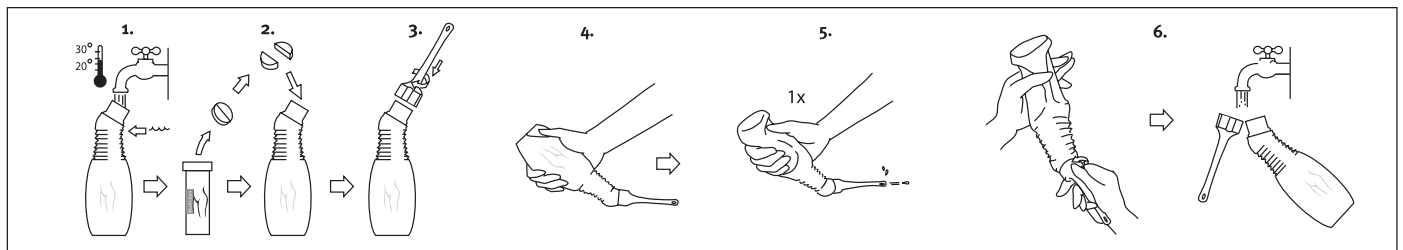

1. Vul de Multi-Gyn Vaginale Douche met lauwwarm water tot aan de bovenkant van de ribbels
2. Breek een Multi-Gyn Bruistablet en voeg deze toe aan het water
3. Draai de canule op de flacon en wacht tot de Multi-Gyn Bruistablet is uitgebruist

4. Breng de canule voorzichtig aan in de vagina
5. Knijp rustig in de flacon om de vagina met douchevloeistof te spoelen. Het is normaal dat vloeistof (vrijwel de halve flacon) overblijft in de flacon*

6. Haal de canule los van de flacon en spoel beide grondig schoon met warm water. Laat het aan de lucht drogen (bij voorkeur op een droge plek).

*De hoeveelheid vloeistof is genoeg om de vagina te spoelen. Als je nog een keer wil spoelen met de overgebleven vloeistof, schroef de canule van de flacon, zodat de flacon zijn originele vorm terugkrijgt en ga verder vanaf stap 4.

Multi-Gyn® Bruistabletten

MULTI-GYN BRUISTABLETTEN CREËREN EEN NATUURLIJKE EN MILDE DOUCHEVLOEISTOF VOOR OPTIMALE VAGINALE HYGIËNE

- Eén bruistablet is voldoende voor een flacon douchevloeistof
- Bevat natuurlijke ingrediënten en is parfümvrj
- Gecombineerd met de Multi-Gyn Vaginale Douche geven de bruistabletten optimale vaginale hygiëne
- Natuurlijke en milde douchevloeistof voor optimale vaginale hygiëne

MILDE VAGINALE BRUISTABLETTEN MET NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

Multi-Gyn Bruistabletten, opgelost in warm water, creëren een milde douchevloeistof geschikt voor de Multi-Gyn Vaginale Douche. De geconcentreerde bruistabletten bevatten natuurlijke ingrediënten.

INGREDIËNTS

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Ascorbic Acid.

Actieve hoofdingrediënt 2QR-complex poeder:

Gepatenteerde bio-actieve polysacchariden gezuiverd uit Aloë Barbadensis Leaf Extract

De bruistabletten hebben een korrelig uiterlijk en kunnen een beetje verschillen in kleur. Deze kleine variaties komen door de natuurlijke eigenschappen van het hoofdingrediënt, 2QR-complex. Dit heeft geen effect op de effectiviteit of de veiligheid van het product.

BEWAREN

Buiten zicht en bereik van kinderen houden. Het is aan te raden Multi-Gyn Bruistabletten in hun originele verpakking op een droge plek te bewaren bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C (kamertemperatuur).